




# 자동심장충격기(AED) 보관함 제품 조립 설명서


## 벽걸이형 보관함

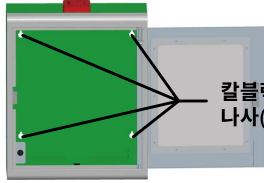

캡볼럭(4ea), 나사(4ea)

· 그림과 같이 상부 본체 문을 개방 후 구멍에 맞춰 동봉되어 있는 캡볼럭과 나사를 이용해 벽에 단단하게 고정시켜줍니다.


## 스탠드형 보관함

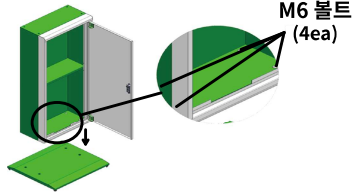

M6 볼트 (4ea)

### ① 하부 베이스 조립

· 하부 본체를 그림과 같이 베이스 상단에 올려 구멍에 맞춰 세워줍니다.  
· 구멍에 맞춰 동봉되어 있는 M6볼트를 단단하게 조여 고정시켜줍니다.

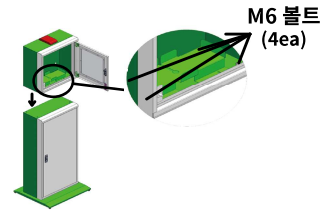


M6 볼트 (4ea)

### ② 상부 본체 조립

· 고정되어 있는 하부 본체 위 구멍에 맞춰 상부 본체를 세워줍니다.  
· 구멍에 맞춰 동봉되어 있는 M6 볼트를 단단하게 조여 고정시켜줍니다.

## 경광등 경보음 조절

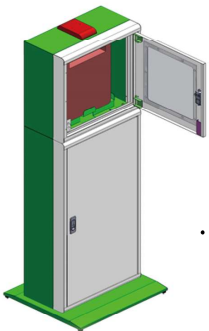


경보음 조절 스위치


· 상부 본체 문 개방 후, 안쪽 천장에 노출된 경광등 왼쪽의 검은 스위치를 이용하여 경보음 조절 (앞 : ON / 뒤 : OFF)

※ 주의 : 경광등 경보음 초기설정 : OFF

## 경광등 건전지 교체

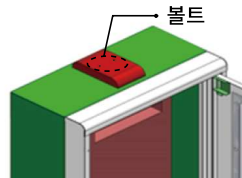

볼트

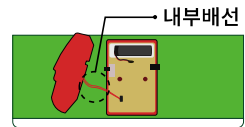

내부배선




건전지케이스와 선 연결부

① 경광등 위쪽 두개의 볼트를 작은 드라이버로 풀어 덮개를 열어줍니다.

※ 주의 : 경광등 분해시 내부배선이 끊어지지 않게 주의 요망

② 경광등 본체 내 건전지케이스와 선 연결부를 분리하여 새로운 건전지로 교체 후 다시 연결시켜줍니다.

## 경광등 경보음이 꺼지지 않는 경우 점검법

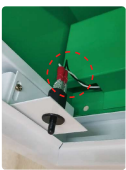

① 보관함 문 안쪽 스위치의 전선이 잘 연결되어 있는지 확인



② 보관함 안쪽 정면 가운데의 철판 뒤 전선이 잘 연결되어 있는지 확인  
- 옆 사진과 같이 흰색 커넥터와 전선이 잘 연결되어 있는지, 혹은 전선의 피복이 물려 연결이 안되어 있는지 확인

※ 주의 : 전선을 강하게 당기면 단선의 위험이 있음

\* 위 두가지 방법으로 점검 후에도 경보음이 꺼지지 않는 경우, 아래 대표전화 or A/S고객센터로 전화문의 바랍니다.

## 보관함 기본구성



상부본체



캡볼럭 4ea (상부본체 조립볼트)



나사 4ea (상부본체 조립볼트)




경광등



건전지 (AA 1.5V)



하부본체

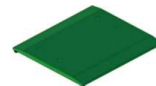

베이스



M6볼트 8ea (하부베이스, 상부본체 조립볼트)