

(주)라디안큐바이오 AED보관함 조립설명서

벽걸이형 구성품



칼블럭 4개
(상부본체 고정용)



나사 4개
(상부본체 고정용)



경광등 · 건전지2개




상부 본체



하부 본체




볼트 8개
(상부, 하부 조립용)

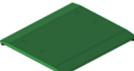

베이스


스탠드형 구성품

벽걸이형 보관함

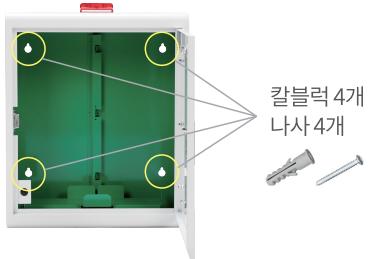


상부 본체 문을 열고
칼블럭과 나사를 4개의 구멍에 맞춰서
벽에 단단하게 고정시켜줍니다.

스탠드형 보관함

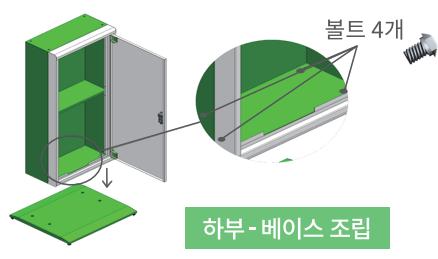

하부 - 베이스 조립

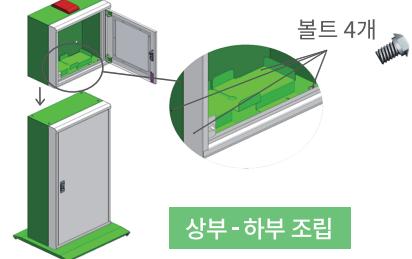

상부 - 하부 조립

- 1 하부 본체를 베이스 상단에 올리고 4개의 구멍에 맞춰서 볼트로 조여 고정시켜줍니다.

- 2 베이스에 고정된 하부 본체 위에 상부 본체를 올리고 4개의 구멍에 맞춰서 볼트로 조여 고정합니다.

A 경광등 전원스위치 (볼륨조절 X)



* 경광등 경보음 초기설정 OFF



상부 본체 문을 열면,
천장 중간에 돌출된 영역의
왼쪽에 있는 검정색 스위치로
경보음 ON/OFF

(앞 : ON / 뒤 : OFF)

B 경광등 전원스위치 (볼륨조절 O)



[전원 스위치]
상부 본체 문을 열면,
천장 왼쪽에 노출되어 있는
검정색 스위치로 경보음 ON/OFF
(앞 : ON / 뒤 : OFF)



[볼륨 스위치]
상부 본체 문을 열면,
천장 오른쪽에 노출되어 있는
다이얼로 볼륨 조절

A 경광등 건전지 교체 방법

* B타입은 고객센터로 문의바랍니다.

- 1 경광등 윗쪽 두 개의 나사를 드라이버로 풀어서 덮개를 열어줍니다.

⚠ 경광등 덮개 분해시 내부 배선이 끊어지지 않도록 주의

- 2 AA건전지 2개 교체 후 덮개를 닫아줍니다.

⚠ 내부 배선이 접혀 단선되지 않도록 주의

