

330



1	2	3	4	5	6
응급환자 의식확인	자동심장충격기 준비	환자에게 패드부착	심전도 분석	자동심장충격기 쇼크 실행	심폐소생술 실시
<p>응급환자 발생시 의식과 호흡이 없다면 주변에 응급요청 후 심폐소생술</p> <ul style="list-style-type: none"> - 가슴압박 30회 - 인공호흡 2회 <p>혼자일 경우 직접 119에 신고, 누군가가 있으면 119신고와 자동심장충격기 요청 후 도착할때 까지 심폐소생술을 계속 반복</p>	<p>자동심장충격기 전원을 켜고, 덮개를 열어 성인 / 소아 버튼 설정</p> <p>성인 / 소아 버튼 선택 소아 기준 - 7세 이하, 25kg 미만</p>	<p>패드를 개봉 후 환자연령에 맞게 올바른 부위에 패드를 부착</p> <p>8세이상, 25Kg 이상 - 성인 방식 부착 7세 이하, 25kg 미만 - 소아 방식 부착</p>	<p>정확한 심전도 검출을 위해 환자와 접촉 금지</p> <p>자동심장충격기의 원활한 심전도 분석을 위해 주변에 있는 사람들은 환자와 접촉금지</p>	<p>음성 안내에 따라 쇼크 버튼을 누름</p> <p>자동심장충격기의 음성 안내에 따라 깜빡이는 주황색 쇼크버튼을 눌러 전기충격 실행</p>	<p>음성 안내에 따라 심폐소생술 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 가슴압박 30회 - 인공호흡 2회 <p>자동심장충격기의 음성 안내에 따라 심폐소생술(5회) 실시, 구급대원이 도착할 때 까지 순서 4번-5번-6번 반복</p>
<p>119</p> <p>가슴압박 30회 인공호흡 2회</p>	<p>POWER</p> <p>성인 8+ 25kg+ 소아 1-7 25kg-</p>	<p>성인 소아</p>		<p>SHOCK</p>	<p>가슴압박 30회 인공호흡 2회</p>