

HR-501

HEART GUARDIAN

심폐소생술 요령 및
자동심장충격기 사용방법



공급원: (주)라디안
서울특별시 금천구 가산디지털2로 53
(가산동 한라시그마빌리 1609호)
A/S 고객센터 : 1670-1980
FAX: 02-6499-3076
Email: sales@radian.co.kr

HR-501

HEART GUARDIAN

퀵 가이드

심폐소생술 요령 및
자동심장충격기 사용방법



1

응급환자 의식확인

응급환자 발생시 의식과 호흡이 없다면 주변에 응급요청 후 심폐소생술

- 가슴압박 30회
- 인공호흡 2회

혼자일 경우 직접 119에 신고, 누군가가 있으면 119신고와 자동심장충격기 요청 후 도착할때 까지 심폐소생술을 계속 반복



가슴압박 30회 인공호흡 2회

2

자동심장충격기 준비

자동심장충격기 전원을 켜고, 덮개를 열어 성인/어린이 선택 스위치를 설정

성인, 어린이/유아 버튼 선택
어린이/유아 기준
- 7세 이하, 25kg 미만



3

환자에게 패드부착

패드를 개봉 후 환자 연령에 맞게 올바른 부위에 패드를 부착하고 연결

8세 이상, 25kg 이상
- 성인 방식 부착
7세 이하, 25kg 미만
- 어린이/유아 방식 부착



4

자동심장충격기 심전도 분석

정확한 심전도 검출을 위해 환자와 접촉금지

자동심장충격기의 원활한 심전도 분석을 위해 주변에 있는 사람들은 환자와 접촉금지



5

자동심장충격기 쇼크 실행

음성 안내에 따라 쇼크 버튼을 누름

자동심장충격기의 음성 안내에 따라 깜빡이는 주황색 제세동 쇼크 버튼을 눌러 전기충격 실행



6

심폐소생술 실시

음성안내에 따라 심폐소생술을 다시 실시

- 가슴압박 30회
- 인공호흡 2회

자동심장충격기의 음성 안내에 따라 심폐소생술(5회) 실시, 구급대원이 도착할 때 까지 순서 4번-5번-6번 반복



가슴압박 30회
인공호흡 2회